

# 彰化縣全自動身高體重計及視力檢查儀採購案(開口契約)

## 「視力檢查儀」教育訓練紀錄表

一、裝設單位名稱：\_\_\_\_\_

二、教育訓練日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

1. 專案使用者完成以下教育訓練項目者，請打 V。

品項	項目	內容	說明	完成教育訓練者，者請打 V
視力檢查儀	01	電源開關位置	電源開啟時，電源開關呈現亮紅燈顯示	
	02	主機開機畫面	開機畫面為黑屏畫面，需等待約 30 秒才會進入視力檢查器檢測畫面，開機 30 秒內請勿重覆開關機，避免出現當機情況	
	03	開機畫面	左下機會出現小紅點燈號	
	04	搖控器與主機藍芽連線	搖控器開關在於左上側，電源開關呈現亮紅燈顯示，連線成功主機左下方紅點燈號顯示會改變成綠色燈號。	
	05	功能選擇	按右側紅色按鍵，依序選擇功能	
	06	選擇左右眼	點選上方左眼或右眼按鍵	
	07	搖控器出題方式	1. 自動出題：將手指重覆輕放在視標大小按鍵上，電腦會自動出題方向 2. 手動出題：將手指輕放在視標大小按鍵上，再選擇中間四個方向出題。	
	08	輸入電腦	左右眼量測完畢，按下方輸入鍵就可以將左右眼視力值同時輸入電腦內	
	09	連線軟體教學	功能教學：1. 登入 2. 連線 3. 跳號功能測試	
	10	遮眼棒	遮眼棒使用教學、點交 25 支遮眼棒	

2. 安裝人員教導【視力檢查儀】管理人員(專案使用者)確認以下項目：

(1)能測試判斷【視力檢查儀】是否正常使用，操作及管理方式。

(2)能清楚知悉【視力檢查儀】故障異常處理 sop 流程及廠商聯繫窗口。(APP 保養)

【廠商窗口：\_\_\_\_\_、電話：\_\_\_\_\_、傳真：\_\_\_\_\_】

廠商人員(簽章)：\_\_\_\_\_

專案使用者管理人員(簽章)：\_\_\_\_\_專案使用者單位主管(簽章)：\_\_\_\_\_

# 彰化縣全自動身高體重計及視力檢查儀採購案(開口契約)

## 「全自動身高體重計」教育訓練紀錄表

一、裝設單位名稱：\_\_\_\_\_

二、教育訓練日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

1. 專案使用者完成以下教育訓練者，請打 V。

品項	項目	內容	說明	完成教育訓練者，請打 V
全自動 身高體 重計	01	儀器搖晃測試	測試儀器是否會搖晃, 如會搖晃請調整機器下方儀器調整腳	
	02	電源開關位置	電源開啟時，電源開關呈現亮紅燈顯示	
	03	量測方式	量測者上到踏板後, 停止 3~5 秒壓板會自動下降，提醒量測者眼睛平視前方，量測完成即可下來，必免二次測量。	
	04	藍芽連線方式	需將藍芽接受器插入電腦主機 USB 插孔	
	05	連線軟體教學	功能教學：1. 登入 2. 連線 3. 跳號功能測試	

2. 安裝人員教導【全自動身高體重計】管理人員(專案使用者)確認以下項目：

(1)能測試判斷【全自動身高體重計】是否正常使用，操作及管理方式。

(2)能清楚知悉【全自動身高體重計】故障異常處理 sop 流程及廠商聯繫窗口。

(APP 保養)

【廠商窗口：\_\_\_\_\_、電話：\_\_\_\_\_、傳真：\_\_\_\_\_】

廠商人員(簽章)：\_\_\_\_\_

專案使用者管理人員(簽章)：\_\_\_\_\_專案使用者單位主管(簽章)：\_\_\_\_\_